

**INTELIGENTNY ZEGAREK  
Z POMIAREM CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA,  
i MONITOREM SNU  
MODEL RR\_V2(KW10)  
INSTRUKCJA OBSŁUGI**



Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem zegarka proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz warunki gwarancji. Nie przeczytanie instrukcji może spowodować błędną obsługę zegarka, doprowadzić do jego uszkodzenia i w konsekwencji utratę gwarancji.



1. Włączenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu działania dłużej niż 3 sekundy, aby włączyć zegarek.

2. Wyłączenie zasilania: Krótco naciskać przycisk trybu działania do momentu pojawieniu się na wyświetlaczu zegarka ekranu wyłączenia (rysunek nr 1). Następnie naciśnij długo przycisk trybu działania, do momentu wyświetlenia na ekranie opcje **YES** (TAK) i **NO** (NIE) (rysunek nr 2). Teraz naciśnij krótko przycisk trybu działania, kolor **YES** (TAK) zmieni się z pomarańczowego na czerwony, a następnie długo naciśnij przycisk trybu działania. Zegarek wyłączy się.



rysunek nr 1



rysunek nr 2

**Uwaga: podczas ładowania nie ma możliwości wyłączenia zegarka.**

## WSZYSTKIE MODELE MOGĄ PRACOWAĆ Z SYSTEMAMI



ANDROID

wersja 5.0 i wyższe



iOS

wersja 9.0 i wyższe

## SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

### I. Pobieranie aplikacji i podłączenie.

1. W celu podłączenia zegarka ze smartfonem potrzebna jest aplikacja. Należy pobrać aplikację WearHealth poprzez zeskanowanie kodu QR.



2. Użytkownicy systemu Android mogą również pobrać również Aplikację wyszukując w sklepie Google Play **WearHealth** użytkownicy systemu IOS mogą również pobrać Aplikację wyszukując w sklepie App Store **WearHealth**

3. Połączenie zegarka ze smartfonem za pomocą Aplikacji

**Krok 1:** Otwórz ustawienia Bluetooth w smartfonie.

**Krok 2:** Pobierz i zainstaluj na smartfonie Aplikację **WearHealth** na swoim zarejestrowanym prywatnym koncie zgodnie z instrukcją na ekranie smartfona lub zaloguj się na inne konto.




Do poprawnego funkcjonowania należy udzielić wszelkich zezwoleń, o które pyta system telefonu. Ponadto w systemie telefonu należy ustawić Aplikację WearHealth jako aplikację niemonitorowaną przez system oszczędzania energii. Np. W urządzeniach SAMSUNG należy wejść po kolei Ustawienia → Konserwacja Urządzenia → Bateria → Aplikację niemonitorowane i dodać aplikację WearHealth do aplikacji niemonitorowanych

**Krok 3:** Otwórz ekran Aplikacji WearHealth w smartfonie. Następnie na dole aplikacji naciśnij po kolei **Użytkownik → Ustawienia urządzenia → Szukaj bransoletki**. Następnie znajdź i kliknij odpowiednie urządzenie z Bluetooth w celu połączenia z aplikacją. Znajdź i kliknij odpowiedni Bluetooth do połączenia. Ekran czasu zegarka podświetli na niebiesko ikonę Bluetooth po udanym połączeniu. Bransoletka zsynchronizuje czas smartfona oraz pozostałe dane personalne ze smartfona m.in. dane dotyczące uprawianych sportów.

## II. Rozłączanie aplikacji

1. Rozłączanie dla telefonów z systemem Android: Otwórz ekran Aplikacji WearHealth w smartfonie. Następnie na dole aplikacji naciśnij po kolei **Użytkownik → Ustawienia urządzenia → Odłącz urządzenie**. Możesz również odłączyć zegarek od smartfona wyłączając połączenie Bluetooth w swoim smartfonie. W takim przypadku po ponownym włączeniu połączenia Bluetooth w smartfonie zegarek automatycznie się z nim połączy.

2. Rozłączanie dla telefonów z systemem IOS: Kliknij przycisk Wyłącz połączenie bransoletki na ekranie menadżera aplikacji WearHealth, przejdź do ustawień systemowych Bluetooth kliknij znak wykrzyknika za nazwą urządzenia zignoruj urządzenie, aby całkowicie odłączyć odpowiednie połączenie Bluetooth.

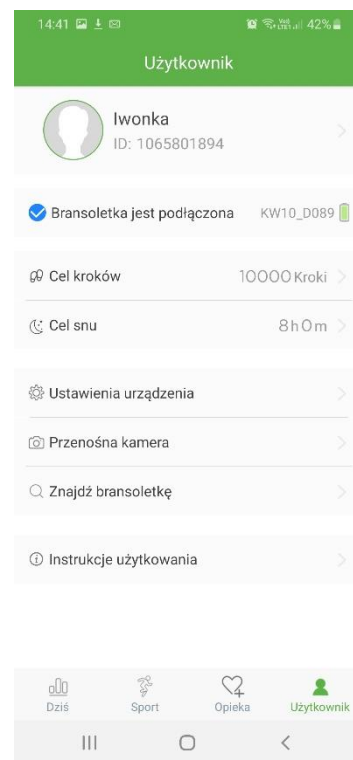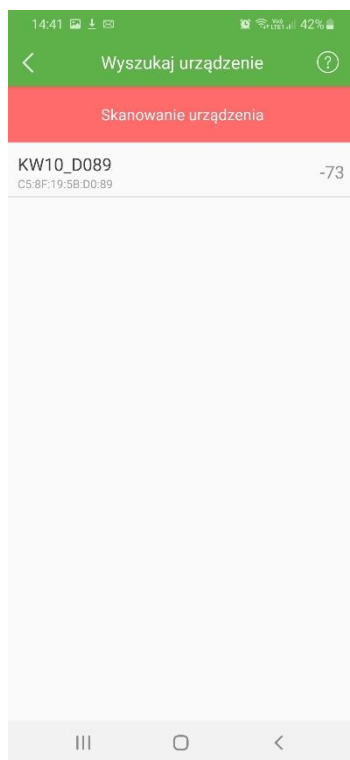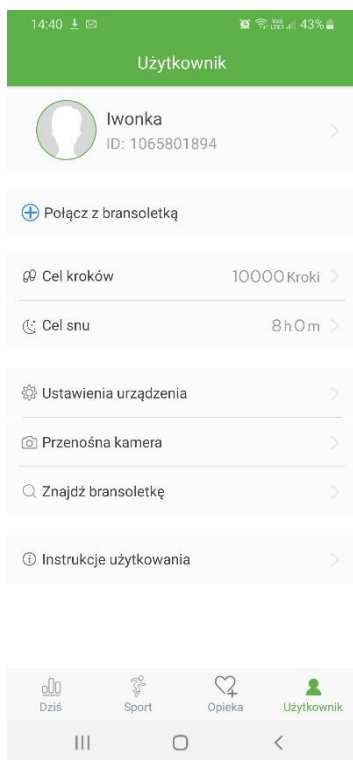

### III. Tryb działania

1. Krótkie naciśnięcie przycisku: przełączenie menu ekranu
2. Długie naciśnięcie przycisku: ok / wyjście z menu ekranu
3. Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Po zakończeniu ładowania zegarek samoczynnie wyświetli ekran czasu. Jeżeli zegarek nie jest długo używany, należy go naładować raz w miesiącu.

### IV. Główne motywy wyświetlacza

Naciśnij długo przycisk trybu wyboru w interfejsie wyboru motywu (rysunek nr 3),

Wejść do interfejsu wybierania motywu (rysunek nr 4)

Krótkie naciśnięcie przycisku trybu działania spowoduje przełączenie motywów zegarka, natomiast długie naciśnięcie jego zmianę.



rysunek nr 3




rysunek nr 4

### V. Opis głównych funkcji zegarka

#### 1. Liczenie kroków, kalorie, dystans

Zegarek rejestruje liczbę twoich kroków w ciągu jednego dnia. Liczba kroków zostanie wyzerowana o północy każdego dnia, a zegarek rozpocznie rejestrację liczy kroków w dniu następnym. Zegarek również rejestruje i wyświetla spalone przez użytkownika kalorie oraz


przebyty dystans w ciągu jednego dnia. (jednostki metryczne lub jednostki brytyjskie mogą być ustawione w aplikacji zgodnie z wymaganiami użytkownika).

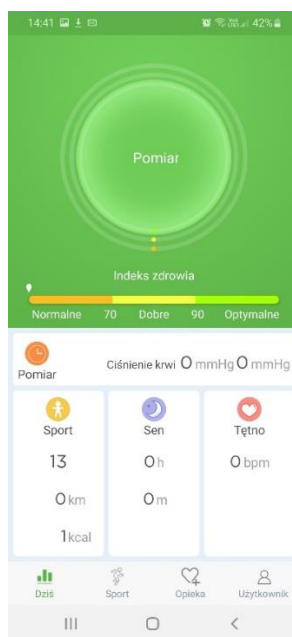


## 2. Tętno

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu wyboru na interfejsie tętna, aby rozpocząć pomiar (rysunek nr 6)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu wyboru, aby wyjść z interfejsu pomiaru lub krótko naciśnij boczny przycisk, aby bezpośrednio powrócić do ekranu głównego. Historia pomiarów jest wyświetlana na głównym interfejsie tętna (rysunek nr 5). Podczas monitorowania tętna zegarek musi ściśle przylegać do dłoni.

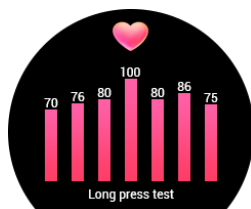


rysunek nr 5

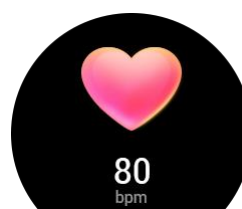

rysunek nr 6

## 3. Ciśnienie krwi

Zegarek może zmierzyć ciśnienie krwi użytkownika. Już po 1 sekundzie po przełączeniu na ekran ciśnienia krwi zegarek zaczyna dokonywać pomiaru ciśnienia krwi użytkownika. Po zakończeniu pomiaru wibruje, wyświetla wynik na ekranie i przekazuje dane do aplikacji w smartfonie

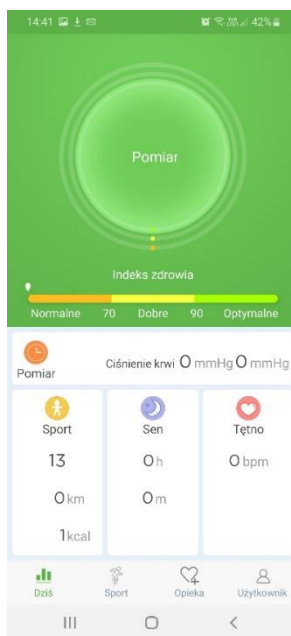


#### 4. Tryb sportowy

Przełącz ekran zegarka na tryb sportowy. Długie naciśnięcie przycisku trybu działania, spowoduje przejście do trybu multi-sport, kolejne długie naciśnięcie przycisku spowoduje rozpoczęcie mierzenia czasu. Następne długie naciśnięcie przycisku zatrzyma pomiar czasu. Jeżeli po zatrzymaniu pomiaru czasu użytkownik krótko naciśnie przycisk, zakończy pomiar i przełączy ekran do następnego trybu sportowego.

Zegarek posiada 9 trybów sportowych:

- bieganie,
- chodzenie
- sportowe,
- wspinaczka górską,
- jazda na rowerze,
- ping-pong,
- koszykówka,
- badminton,
- piłka nożna
- pływanie

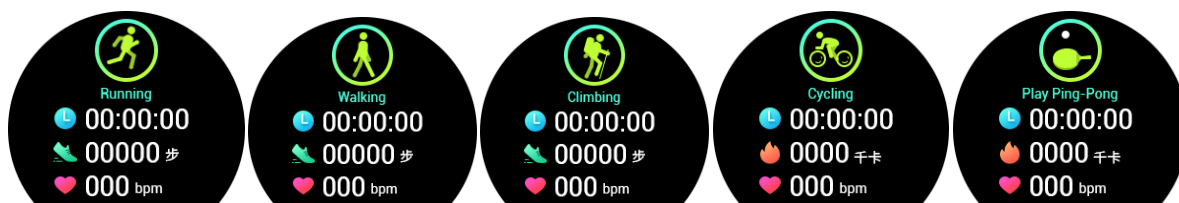


bieganie

chodzenie

wspinaczka

jazda na rowerze

ping pong

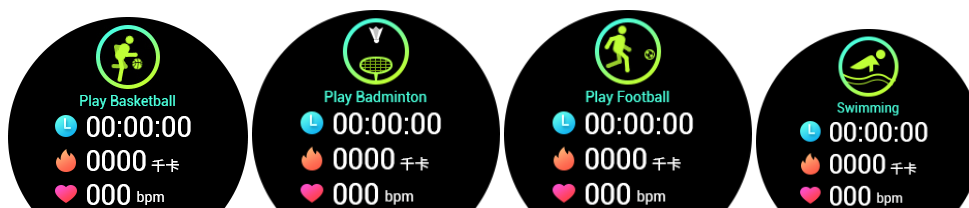

koszykówka

badminton

piłka nożna

pływanie



## 6. Monitorowanie snu

Urządzenie może rejestrować i wyświetlać całkowity czas snu ostatniej nocy. Monitorowanie snu trwa od godziny 22:00 dnia pierwszego do godziny 08:00 dnia drugiego. Odpowiednie dane snu są wyświetlane dopiero po godzinie 08:00 (rysunek nr 7)

Uwaga: Monitorowanie snu podczas okresu innego niż powyższy czas nie jest rejestrowane i wyświetlane.



rysunek nr 7

## 7. Wiadomości

Ostatnie trzy wiadomości zostaną zapisane w pamięci zegarka. W celu przejrzania i usunięcia wiadomości po odczytaniu należy nacisnąć długo przycisk trybu działania. Zegarek może pokazywać wiadomości następujących aplikacji zainstalowanych w smartfonie: QQ, WeChat, Linkedin, Skype, Facebook, Messenger, Twitter, Whatsapp, Viber, Line. W celu wyboru powiadomień należy otworzyć ekran Aplikacji WearHealth w smartfonie. Następnie na dole aplikacji należy nacisnąć po kolei **Użytkownik** → **Ustawienia urządzenia** → **Więcej powiadomień** a następnie wybrać aplikację z jakich chcemy otrzymywać wiadomości w zegarku.

## 8. Znajdź telefon

Przejdź do ekranu Find phone (znajdź telefon) a następnie długo naciśnij przycisk trybu działania

Uwaga: Funkcja ta nie działa w przypadku wyciszenia telefonu i odłączenia zegarka od telefonu.

## 9. Stoper

Przejdź do ekranu stopera. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu działania, aby wejść do stopera. Krótco naciśnij raz przycisk, aby uruchomić funkcję pomiaru czasu i

ponownie krótko naciśnij go, aby wstrzymać tę funkcję. Długo naciśnij przycisk, aby wyjść z funkcji stopera.

## 10. Zdalne fotografowanie

Otwórz aplikację WearHealth na smartfonie. Znajdź funkcję Przenośna kamera, aby uruchomić możliwość kontrolowania fotografowania z telefonu komórkowego za pomocą zegarka.

Uwaga: Aplikacja WearHealth musi mieć włączone uprawnienia do fotografowania w Twoim smartfonie. Podczas korzystania z tej funkcji smartfon musi być podłączony do bransoletki.

## 11. Przypomnienia

Można ustawić różne przypomnienia, takie jak połączenia przychodzące, sms, alarmy, o ruchu, spotkaniach, przyjmowaniu leków i o picciu. W tym celu należy otworzyć aplikację WearHealth na smartfonie i dokonać odpowiedniego wyboru.

## 12. Automatyczne podświetlenie ekranu

Funkcja włączania lub wyłączenia podświetlenia ekranu zegarka przez obracanie nadgarstka może być ustawiona w aplikacji WearHealth smartfonu. Ekran wyświetlacza automatycznie się zaświeci, gdy obrócimy nadgarstek podczas sprawdzania czasu.



## Ładowanie zegarka

Do zestawu nie jest dołączona ładowarka. Do ładowania zegarka należy używać ładowarki / źródła zasilania o następujących parametrach :  $U = 5 \text{ Vdc}$  ;  $I_{\text{max}} = 1.0 \text{ A}$

W przypadku użycia źródła zasilania o napięciu i/lub natężeniu prądu większym niż podane w niniejszej instrukcji może dojść do :


- uszkodzenia zegarka ( ciemny ekran i brak reakcji na użycie przycisku zasilania / trybu działania)




- znacznego zmniejszenia żywotności baterii skutkujące znacznym zmniejszeniem czasu pracy ( z 7-8 dni w trybie standby do poniżej 24 godzin)

Uszkodzenia spowodowane zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania nie są objęte gwarancją.

W zegarku zastosowano technologię ładowania za pomocą styków magnetycznych, umożliwiającą ładowanie urządzenia po zetknięciu między metalowym stykiem linii ładowania i portem ładowania USB.

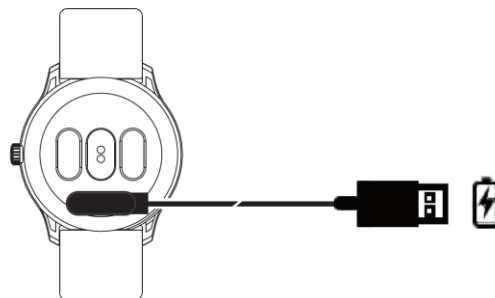

## KARTA GWARANCYJNA

 <b>KARTA GWARANCYJNA PRODUKTU</b>	
Data sprzedaży	
Nr dokumentu sprzedaży	
Model	N58V4.0
Numer seryjny	
Kontrola jakości	
Uszkodzenia	
RR	
HR	
RR i HR	

### Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez firmę KENYS zwaną dalej Sprzedającym są objęte gwarancją. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w

karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z naszym sklepem.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

- a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
- b. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi

3. W razie uwzględnienia istnienia wady firma KENYS wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub wadę usunie według żądania Klienta, chyba że spełnienie sposobu określonego przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów.

4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmią), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.

5. Sprzedający w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego wraz z opisem reklamacji. Numer seryjny reklamowanego produktu musi być zgodny z numerem seryjnym na dowodzie sprzedaży. W przypadku braku zgodności numeru seryjnego produktu z numerem seryjnym na dowodzie sprzedaży Sprzedający nie uzna reklamacji.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn powstałych w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważniony jest wyłącznie punkt serwisowy firmy KENYS, 05-500 Piaseczno, ul Młynarska 17/90. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez punkt serwisowy firmy KENYS. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub napraw poza punktem Serwisowym firmy KENYS prawa gwarancyjne zostaną utracone.

9. Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;

- uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie i prąd ładowania ( dla smartwatchy wyższe niż 5V i 1,0 A), niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także będących poza kontrolą Gwaranta;
- w przypadku smartwatchy, które są urządzeniem elektronicznym gwarancja jak wskazano w powyższym punkcie nie obejmuje kondensacji pary wodnej w przypadku szybkiej i gwałtownej zmiany temperatury. W smartwatchu znajduje się powietrze, które zostało zamknięte w procesie produkcji. Powietrze to na skutek szybkiej zmiany temperatury osadza się na szybcie. Zasada ta dotyczy czystych praw fizyki i w każdym smartwatchu nawet wodoszczelnym ma prawo wystąpić takie zjawisko. Dlatego, gdy smartwatch przebywa pod rękawem w kurtce w mroźny dzień i nagle zostanie wyjęty, ochłodzony zimną wodą, powietrzem czy śniegiem to może zaparować. Również latem przy bardzo wysokich temperaturach, podczas przebywania na słońcu, a potem wejściu do klimatyzowanego samochodu smartwatch ma prawo zaparować w wyniku szybkiej zmiany temperatury otoczenia. Tylko smartwatche posiadające Certyfikat ISO6425 czyli są smartwatche dla nurków nie mają prawa parować . Inne smartwatche mogą natomiast parować w wyniku szoku termicznego. Takie zjawisko nie jest objęte gwarancją;
- nieprawidłowa konfiguracja telefonu/smartfona mająca wpływ na poprawność działania aplikacji obsługującej dany typ smartwatcha. W przypadku problemów z instalacją i uruchomieniem należy skontaktować się z infolinią techniczną firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50.
- okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego ( zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia bransolety i/lub pasków smartwatcha, wytarcia napisów, szkła koperty itp.);
- usunięcie lub instalacja produktu, czyszczenie zewnętrznie i/lub czyszczenie wewnętrzne;
- uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania ( np. używania smartwatcha w saunie, podczas brania gorącego prysznica, doprowadzenie do zapiaszczenia urządzenia np. podczas pracy w polu). Gdy para wodna lub spore ilości piasku dostaną się do urządzenia spowodują uszkodzenia elementów peryferyjnych;
- wykorzystanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji, używanie z inną aplikacją niż wskazana w instrukcji obsługi.
- uszkodzenie układu ładowania smartwatcha na skutek zastosowania źródła zasilania o większym napięciu i prądzie znamionowym niż wskazany w instrukcji obsługi;
- zmniejszenie żywotności baterii smartwatcha / zmniejszenie czasu pracy baterii na skutek zastosowania źródła ładowania o większym napięciu i prądzie znamionowym niż wskazane w instrukcji obsługi;
- uszkodzenia powstałe na skutek wycieku produktów spożywczych, płynów lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
- awarie na skutek nieprawidłowego podłączenia urządzenia, użycia innej aplikacji niż wskazana w instrukcji obsługi, wadliwym działaniem smartfona, z którym współpracuje smartwatch oraz niezgodnością pomiędzy aplikacją a środowiskiem pracy;


- awarie spowodowane niepoprawnym działaniem aplikacji obsługującej smartwatch na skutek wpływu wirusów zainstalowanych w smartfonie, do którego podłączony jest smartwatch.

W przypadku konieczności porozumienia się z Punktem Serwisowym KENYS proszę skontaktować się z Infolinią firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50 ( koszt połączenia wg taryfy operatora)

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Inteligentny zegarek jest produktem zaawansowanym technologicznie, ponieważ przez ciągle aktualizacje algorytmów Producent nieustannie ulepsza funkcję produktu. Jeżeli interfejs użytkownika zakupionego zegarka odbiega od tego przedstawionego w instrukcji, zapoznaj się z oficjalnymi ogłoszeniami Producenta lub skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem telefonu + 48 534 89 60 50 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem Twojego operatora)

## DYSTRYBUTOR W POLSCE

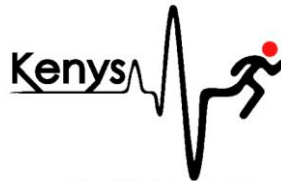

+48 530 92 66 29  
+48 534 89 60 50  
kenys@kenys.eu  
www.zegarekekg.pl  
www.dlabiegacza.eu



KENYS EU



### Ostrzeżenia!

Postępuj zawsze zgodnie instrukcjami lekarza. To urządzenie jest wrażliwe na poprawność użytkownika. Podczas pomiaru nie wolno mówić i ruszać się. Należy mieć odpowiednio nawilżoną skórę. Użytkownik, który cierpi na zaburzenie układu krążenia, choroby krwi, zaburzenia hormonalne i inne choroby układu rozrodczego powinien natychmiast poddać się leczeniu pod kierunkiem lekarza. Zegarek nie może być używany i stosowany jako metoda antykoncepcji. Wyniki pomiarów wykonane tym urządzeniem mogą mieć jedynie cel informacyjny i nie w mogą być podstawą diagnostyki medycznej!

Niniejsza instrukcja stanowi własność intelektualną firmy KENYS 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 5/48 zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.1994 nr 24 poz.83.